




BIOSYNEX® Chlamytop

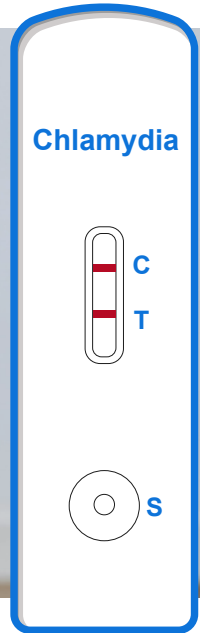

Test Rapido qualitativo per la rilevazione della *Chlamydia* antigene da campioni endocervicali, uretrali e urine

● **Efficiente**

*Semplice esecuzione
Risultato in 15 minuti*

● **Affidabile**

*Performances elevate:
sensibilità: 98.9%
specificità: 92.5%*

● **Lunga scadenza**

18 mesi a temperatura ambiente

LA SOLUZIONE

L'infezione urogenitale da *Chlamydia trachomatis* è asintomatica e può colpire soggetti maschi o femmine che inconsapevolmente trasmettono questo batterio al proprio partner sessuale. Colpisce in particolare i giovani uomini e donne in età riproduttiva, costituendo così un vero problema di salute pubblica a livello mondiale. L'OMS stima che ogni giorno si verifichino quasi un milione di nuovi casi. Inoltre, questa infezione può indurre diverse complicazioni (prostatite ed epididimite nell'uomo, salpingite e infertilità nella donna, congiuntivite del neonato). Durante un'infezione persistente la carica batterica può essere bassa, il che complica la diagnosi biologica. In alcuni casi, la coltura cellulare può dare risultati negativi. L'uso di **Biosynex® Chlamytop** è una soluzione rilevante per l'identificazione facile e rapida degli antigeni della *Chlamydia*.

Procedura

• Campione Endocervicale o uretrale



Aggiungere **8 gocce** of **soluzione A** nella provetta di estrazione



Immergere il tampone del paziente ed estrarre per **2 minuti**.



Aggiungere **8 gocce** di **soluzione B** e miscelare.



Pressare e roteare il tampone lungo le pareti della provetta di estrazione.



Chiudere la provetta con il tappo.



Aggiungere **3 gocce** di campione estratto nel pozzetto S del dispositivo e attendere **15 minuti**.




• Urine

Centrifugare le urine (almeno 15 mL) a 10,000 RPM per 10 minuti.

Drenare il surnatante e aggiungere 8 gocce di soluzione di estrazione A alla provetta, risospingere il pellet con una pipetta e incubare per 2 minuti.

Trasferire la soluzione nel tubo di estrazione con una pipetta. Aggiungere 8 gocce di soluzione di estrazione B e mescolare. Aggiung 3 gocce e leggi il risultato a 15 minuti.

Risultati

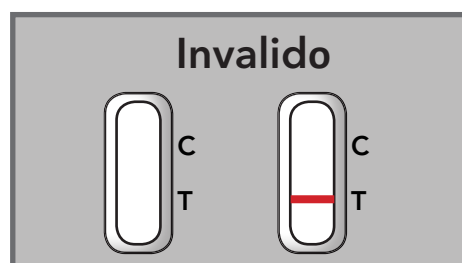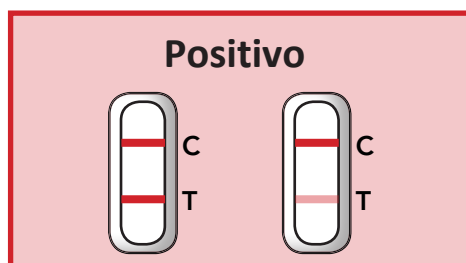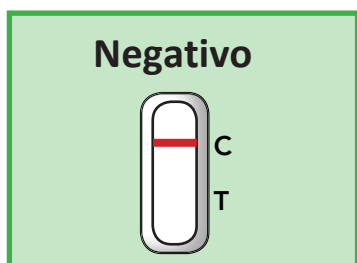

Contenuto del Kit

- Test card
- Estrazione soluzione A (7 mL) 0.6% NaOH
- Estrazione soluzione B (7 mL) 0.6M HCl
- Estrazione provette e tappi
- Supporto in plastica
- Istruzioni
- Tamponi Sterili



Referenza Prodotto

- Codice: 1030003
- BIOSYNEX® Chlamytop
- 20 Test



CONTATTI:

MERIDIAN HEALTHCARE srl

Phone: +39 095 725 6869 Fax: +39 095 725 4454

www.meridianhealthcare.it