

## CALBRATORE TDM CARBAMAZEPINA

REF: CBZ CAL

CONF. 6x1 ml.

### REAGENTI

Il preparato è un siero di origine umana sviluppato per la calibrazione dei farmaci (TDM) con metodo con metodo **Enzyme Multiplied Immunoassay**. Il kit contiene sei flaconi liquidi a concentrazione nota.

### CONSERVAZIONE

Il kit va conservato a temperatura refrigerata tra i 2-8°C. Stabile fino alla data di scadenza riportata sulla confezione. REATTIVO APERTO: Richiudere immediatamente il reagente dopo l'uso. Evitare la contaminazione batterica, la luce diretta e l'evaporazione. Conservare alla temperatura indicata sull'etichetta.

### PRECAUZIONI - AVVERTENZE

Solo per uso diagnostico in vitro. Non pipettare con la bocca. Questo prodotto proviene da primati ed è stato controllato con un metodo approvato per la determinazione della presenza dell'anticorpo anti-HIV, anti HCV ed anti-HBsAg: i risultati sono stati di non reattività. Poichè però nessun metodo conosciuto può garantire l'assenza assoluta del virus HIV, del virus dell'epatite o di altri agenti infettivi, questo prodotto e tutti i campioni vanno manipolati come potenziali trasmettitori di patologie infettive. I reagenti contengono sodio azide che può reagire con alcuni metalli formando miscele esplosive. Eliminare i residui di reazione utilizzando grandi volumi di acqua. Maneggiare il preparato con cautela, secondo le norme di buona pratica di laboratorio, evitando l'ingestione, il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente. Eventualmente consultare un medico.

### PREPARAZIONE E STABILITA' DEL REAGENTE

Reagente liquido e pronto all'uso.  
Stabile fino alla data di scadenza.

### SMALTIMENTO

Il prodotto deve essere smaltito secondo le locali normative in materia di gestione dei rifiuti.



Prodotto conforme alla direttiva 98/79 CE



### Meridian Healthcare srl

Via Caronda, 446 SC/A - 95129 Catania - Italy  
Tel. +39 095 725 68 69 - Fax: +39 095 725 44 54  
info@meridianhealthcare.it  
www.meridianhealthcare.it



### VALORI ASSEGNATI per il Lotto 2031 Exp. 2024-12-31

COMPONENTE	UNITA'	LIVELLI					
		1	2	3	4	5	6
Carbamazepina	µg/mL	0.0	2.00	3.86	7.68	11.45	20.86